

# Techno-logische hulpmiddelen

## Catalogus - concept

Overzicht van de techno-logische hulpmiddelen die binnen Liberein in gebruik zijn voor de doelgroepen Wlz, VPT, GRZ en thuiszorg (Zvw). Inclusief werkwijze met betrekking tot aanvragen, inzetten en beheren.

**Deze catalogus is in ontwikkeling**



# Inhoudsopgave

Techno-logische hulpmiddelen.....	3
Definitie .....	3
Werkwijze .....	3
Dagstructuurondersteuning en beeldzorg.....	4
BBrain basic sprekende kalenderklok .....	5
Compaan – beeldzorg .....	6
<nog niet in gebruik> .....	6
Eten en drinken.....	7
Gyenno bravo twist.....	8
Slapen.....	9
Verzwaarde deken / Ballendeken .....	10
Ligorthese .....	11
Somnox .....	12
Sparckl daglichtlamp .....	13
<nog niet in gebruik> .....	13
Ontspanning .....	14
Inmu relax.....	15
Qwiek UP .....	16
Qwiek UP belevingsmodule .....	17
Wonderfoon.....	18
Robothuisdieren .....	19
Radio / muzikspeler met 1 knop.....	20
CRDL .....	21
Voortbewegen .....	22
Wolk heupairbag.....	23
<nog niet in gebruik> .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
Safehip.....	24
Meten en weten.....	25
Withings sleepalyzer .....	26
Countair dosisteller.....	27
Tena identify / Slim incontinentie-materiaal .....	28
<nog niet ingebruik>.....	28
FreeStyleLibre .....	29
Activeren.....	30
Smartwall – sport en spelruimte Bruggerbosch.....	31

Tovertafel.....	32
Belevenistafel.....	33
BeleefTV .....	34
Fietslabyrinth .....	35
Silverfit .....	36

# Techno-logische hulpmiddelen

## Definitie

Onder techno-logische hulpmiddelen worden die producten verstaan die (op indicatie van een behandelaar) worden ingezet ter ondersteuning van de zelfredzaamheid of het vergroten van het welzijn van de bewoner. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende (techno-logische) hulpmiddelen, te weten:

- Hulpmiddelen die op indicatie van een behandelaar worden ingezet (therapeutische hulpmiddelen)
- Medische hulpmiddelen, deze worden gebruikt door of op indicatie van de medische vakgroep in het kader van meten is weten (bloeddruk, bloedsuiker, gewicht, ...)
- Hulpmiddelen ter ondersteuning van welzijn

## Werkwijze

Per product staat aangegeven voor welke doelgroep het product kan worden aangevraagd en ingezet en wat je daarvoor moet doen.

Hulpmiddel	Indiceerder

# Dagstructuurondersteuning en beeldzorg

# BBrain basic sprekende kalenderklok

## Foto



<b>Kenmerken</b>	Dagstructuurondersteuning
<b>Website</b>	<a href="#">BBrain Basic Kalenderklok   Meer dan 20 reminders   BBrain</a>
<b>Handleiding</b>	 BBrain-basic-8-inch-handleiding.pdf
<b>Korte beschrijving</b>	<p><a href="#">BBrain-basic-8-inch-handleiding.pdf</a></p> <p>Uitgebreide tijdsweergave (datum, tijd, dag en dagdeel) met verschillende thema's 20 voorgeprogrammeerde herinneringen inclusief medicatiealarm Mogelijkheid tot zelf herinnering inspreken Natuurlijke stem Geluidsnotificaties bij herinneringen Uitspreken van tijd en dag(deel) Verschillende kleurcontrasten inclusief slechtziende modus Ophangen of neerzetten</p>
<b>Hoe het werkt</b>	De BBrain Basic klok kan de persoon om wie u geeft helpen om onafhankelijk te blijven, zich aan een dagelijkse routine te houden en belangrijke afspraken na te komen. De klok heeft 20 vooraf ingestelde herinneringsberichten die kunnen worden ingesteld om dagelijks, wekelijks of eenmalig uitgesproken te worden. U kunt ook uw eigen gepersonaliseerde herinneringsberichten opnemen om een vertrouwd gevoel te krijgen. Met grote, gemakkelijk te lezen tekst is dit een perfecte klok voor ouderen of slechtzienden.
<b>Doel inzet</b>	De BBrain Basic helpt bij de dagelijkse planning en structuur
<b>Internet / WiFi</b>	Dit hulpmiddel maakt geen gebruik van internet
<b>Financieel</b>	Wlz: via uitleenpunt Liberein VPT: particuliere aanschaf of inzet via prestatiecode 1062 technologie thuis (het moet dan zorgmomenten vervangen) Particuliere aanschaf voor €99,= Geen abonnementskosten
<b>Alternatieven</b>	Papieren agenda Agenda op telefoon Compaan

# Compaan – beeldzorg

<Alleen op de GRZ>

## Foto



<b>Productgroep</b>	Beeldzorg Dagstructuurondersteuning Communicatie
<b>Website</b>	<a href="http://uwcompaan.nl">Inleiding - Compaan (uwcompaan.nl)</a>
<b>Handleiding</b>	Veel gestelde vragen <a href="http://uwcompaan.nl">Veelgestelde vragen - Compaan (uwcompaan.nl)</a>
<b>Korte beschrijving</b>	Beeldbellen voor zorg of begeleiding op afstand Video's, foto's en berichten sturen Instellen van medicatieherinnering Agendaherinneringen instellen Wekelijks een lokale foto van vroeger
<b>Hoe het werkt</b>	Mantelzorgers en zorgverleners kunnen op afstand via een app of platform de instellingen beheren. Keuze uit klassiek en connect.
<b>Doel inzet</b>	Ondersteuning bij dagstructuur Onderhouden van contacten Bieden van beeldzorg of begeleiding
<b>Internet / WiFi</b>	Dit is nodig om de Compaan te kunnen gebruiken
<b>Financieel</b>	Particulier: aanschaf €299, daarnaast is een (data)abonnement nodig. Kosten hiervan kunnen verschillen, zie <a href="http://uwcompaan.nl">Aanschaf, abonnement en proeftijd - Compaan (uwcompaan.nl)</a> GRZ gaat gebruik maken van Compaan Wlz: nu (nog) niet Zvw: financiering via prestatiecode 1062 als het een zorgmoment vervangt VPT: financiering via prestatiecode 1062 als het een zorgmoment vervangt
<b>Alternatieven</b>	BBrain basis sprekende kalenderklok Papieren agenda

# Eten en drinken



# Gyenno bravo twist

## Foto



<b>Productgroep</b>	Eten en drinken
<b>Website</b>	<a href="http://Tremorlepel(hulpmiddelenwijzer.nl)">Tremorlepel (hulpmiddelenwijzer.nl)</a>
<b>Handleiding</b>	Een systeem van tegengewicht en rotatieassen zorgt er voor dat de lepel stabiel blijft, ook als men de hand of arm trilt, draait, buigt of beweegt. Het eten op de lepel valt daardoor niet van de lepel af.
<b>Korte beschrijving</b>	Het is een lepel en vork die het eten voor mensen met tremoren makkelijker maakt door de tremoren 'te compenseren'. Zeer geschikt voor mensen met de ziekte van Parkinson. De GYENNO Bravo Twist is BPA-vrij en ligt goed in de hand. De lepel is eenvoudig te gebruiken. Naast de lepel kan er ook een vork opgezet worden, waardoor de GYENNO spoon voor elke maaltijd gebruikt kan worden. Geschikt voor links- en rechtshandigen.
<b>Hoe het werkt</b>	<a href="http://GYENNO%20Bravo%20Twist-for%20Fun%20Lover(youtube.com)">GYENNO Bravo Twist-for Fun Lover (youtube.com)</a>
<b>Doel inzet</b>	Met een tremorlepel kunt u zonder hulp eten zonder te morsen als u een beperkte hand- en/of armmobiliteit hebt of last heeft van tremor, trillen, vanwege een beroerte, spierziekten of Parkinson.
<b>Internet / WiFi</b>	Geen internet verbinding nodig voor gebruik. Gyenno moet wel worden opgeladen.
<b>Financieel</b>	€349 Particulier aanschaffen via bijvoorbeeld <a href="http://Gyenno%20lepel-%20voor%20mensen%20met%20tremoren-%20D%C3%A9%20Dementie-winkel.nl">Gyenno lepel - voor mensen met tremoren - Dé Dementie-winkel.nl</a> Geen vergoeding via Zvw. Wlz: nog niet beschikbaar via uitleenpunt Liberein. TZA: bekijk het uitleenassortiment via <a href="http://Technologie%20en%20Zorg%20Academie-%20Welkom%20op%20de%20Thuisleefbieb">Technologie en Zorg Academie – Welkom op de Thuisleefbieb</a> (account maken met je werkmail om een aanvraag te kunnen doen)
<b>Alternatieven</b>	Bestek met verdikt handvat voor meer grip Gewichtsmanchet om de pols of verzwaarde polsband

# Slapen

# Verzwaarde deken / Ballendeken

## Foto





<b>Productgroep</b>	Slapen
<b>Website</b>	<a href="https://www.sarkow.nl">https://www.sarkow.nl</a>
<b>Handleiding</b>	<a href="#">Mini-handleiding-dekens.pdf (sarkow.nl)</a>
<b>Korte beschrijving</b>	De druk van de deken helpt het lichaam tot rust te komen en geeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid. De deken stimuleert het lichaam puntsgewijs.
<b>Hoe het werkt</b>	<p>De Protac Ball Blanket® stimuleert het sensorische systeem en draagt bij in het creëren van een beter lichamelijk welzijn. De Protac Ball Blanket® is voorzien van een medisch CE-merk en is een erkend hulpmiddel bij de behandeling van slaapproblemen en motorische en psychische onrust bij kinderen, volwassenen en ouderen. De Protac Ball Blanket® helpt bij het vinden van rust en kalmering en daarbij met het sneller in slaap vallen en beter doorslapen.</p> <p>De Protac Ball Blanket® is werkzaam door het gewicht van de losse ballen die druk geven op drukpunten van het lichaam, waarbij zowel de gewaarwording van aanraking (oppervlakkige sensibiliteit) als de gewaarwording van spieren en gewrichten (diepe sensibiliteit) worden gestimuleerd. De oefening van deze druk zorgt voor meer vertrouwen. Daarom geeft de Protac Ball Blanket® een kalmerende werking.</p>
<b>Doel inzet</b>	Een hulp om te kalmeren en de zintuigen te stimuleren.
<b>Internet / WiFi</b>	Niet van toepassing.
<b>Financieel</b>	Wlz: via uitleenpunt in te zetten op indicatie van een ergotherapeut
<b>Alternatieven</b>	

# Ligorthese

## Foto




<b>Productgroep</b>	Slapen
<b>Website</b>	<a href="http://www.innocare.nl">www.innocare.nl</a>
<b>Handleiding</b>	Opbouw ligorthese <a href="https://youtu.be/HZCX6G3ktY4">https://youtu.be/HZCX6G3ktY4</a> Opbouw ruglig <a href="https://youtu.be/inEKmoiVW6M">https://youtu.be/inEKmoiVW6M</a> Opbouw linker zijlig <a href="https://youtu.be/AcKHaeWwTI">https://youtu.be/AcKHaeWwTI</a> Opbouw rechter zijlig <a href="https://youtu.be/qONB1cRWKsl">https://youtu.be/qONB1cRWKsl</a>
	 Gebruiksaanwijzing.p df
<b>Korte beschrijving</b>	 Comfortligstelsysteem.p df <p>De Dynamische ligorthese bestaat uit diverse onderdelen; klittenbandlaken, overmatras, set positiesteunen en kussens. De benodigde Innocare onderdelen voor jouw lighoudingen hangen af van jouw lichaamsbouw, lichaamshouding en de benodigde steun, ondersteuning en correctie.</p>
<b>Hoe het werkt</b>	De combinatie van materialen maakt dat je iemand die zelf niet meer kan wisselen van houding gemakkelijk in zowel rug- als zijlig symmetrisch kan positioneren. Druk wordt optimaal verdeeld en door het gebruik van de steunen kost het handhaven van de houding de persoon een minimum aan energie.
<b>Doel inzet</b>	Ontspanning in gehele lichaam door optimale ondersteuning
<b>Internet / WiFi</b>	Niet van toepassing
<b>Financieel</b>	Wlz: via uitleenpunt in te zetten op indicatie van een ergo- of fysiotherapeut
<b>Alternatieven</b>	In overleg met ergo- of fysiotherapeut te bespreken: Hoefijzerkussen Flexior kussen Combinatie van verschillende kussens

# Somnox

## Foto



**Somnox 2**

<b>Productgroep</b>	Slapen
<b>Website</b>	<a href="#">Somnox Slaapprogramma - Beter ademen, beter slapen   Somnox</a>
<b>Handleiding</b>	 Somnox2_introvide o.mp4
<b>Korte beschrijving</b>	<p>Zachte, voelbare ademhaling: Somnox beweegt zachtjes op en neer waardoor je de rustige ademhaling snel en makkelijk overneemt.</p> <p>Rustgevende geluiden: maakt diep ontspannende geluiden en kans jouw eigen favoriete muziek, luisterboeken en meditaties afspelen (via koppeling met app op smartphone of tablet).</p> <p>Natuurlijk ontwerp: voelt zacht en comfortabel vanbuiten en robuust en betrouwbaar vanbinnen.</p> <p>Persoonlijke afstemming: past zich automatisch aan op jouw ademtempo en geeft je persoonlijke begeleiding.</p>
<b>Hoe het werkt</b>	Door het voelen en volgen van de rustgevende ademhaling wordt het rustiger in je hoofd, verminder je stress en val je sneller (terug) in slaap. Ook overdag zorgt Somnox voor ontspannen rustmomenten, waardoor zorgen en stress makkelijker van je af kunnen glijden.
<b>Doel inzet</b>	Sneller in slaap vallen. Geborgenheid bieden.
<b>Internet / WiFi</b>	Somnox heeft een app Voor het gebruik van Somnox is internet niet nodig
<b>Financieel</b>	Bewezen technologie. Consumentenelectronica. Aanschaf: €549 Huur(-koop) vanaf €30/maand. Zie <a href="#">Somnox Slaapprogramma - Beter ademen, beter slapen   Somnox</a> > probeer Zvw: vergoeding door ZilverenKruis (tot 100%) en ASR (tot 75%) zie Wlz: via uitleenpunt Liberein verkrijgbaar op indicatie van ergotherapeut of psycholoog
<b>Alternatieven</b>	Inmu relax Verzwaarde deken Ligorthese of andere ligondersteuning

# Sparckl daglichtlamp

Alleen Dorpstraat

## Foto

<b>Productgroep</b>	Slapen Dagstructuurondersteuning
---------------------	-------------------------------------

## Website

## Handleiding

## Korte beschrijving

## Hoe het werkt

## Doel inzet

## Internet / WiFi

## Financieel

## Alternatieven

# Ontspanning

# Inmu relax

## Foto



<b>Productgroep</b>	Ontspanning Activeren Slapen Sensorische integratie Snoezelen Prikkelverwerking
<b>Website</b>	<a href="#">inmuRELAX met katoenen hoes   INMU Touch</a>
<b>Handleiding</b>	Via YouTube <a href="https://youtu.be/iOy8LRgLyAY?si=VH9f5E7ZqU1f0icN">https://youtu.be/iOy8LRgLyAY?si=VH9f5E7ZqU1f0icN</a> PDF bestand <a href="#">inmuRELAX (nl) Ellen.indd (inmutouch.nl)</a>
<b>Korte beschrijving</b>	inmu is een muziekgevoelig stimulerend hulpmiddel dat trillingen en comfortabele geluiden gebruikt om stress te verminderen en om te ontspannen. Eenvoudig in gebruik, gebouwd met integriteit en waardigheid. Rust vinden, momenten met uw dierbaren, kostbare tijd delen, momenten waarvan je dacht dat ze verdwenen waren, herontdek gedeelde herinneringen.
<b>Hoe het werkt</b>	De inmu is gebruiksvriendelijk. Er zijn geen instructies vereist. Pak hem op en hij wordt geactiveerd, leeg hem neer en hij stopt vanzelf. De inmu moet geregeld worden opgeladen.
<b>Doel inzet</b>	De inmuRELAX is goed in het verlagen van nervositeit en rusteloosheid bij mensen die lijden aan dementie. In situaties die oncomfortabel kunnen aanvoelen (bijv. Hulp bij de dagelijkse hygiëne of verplaatst worden), kan dit het stressniveau helpen verlagen en de activiteit kalmer doen verlopen. Het is ook goed om in slaap te vallen en zorgt voor een betere nachtrust.
<b>Internet / WiFi</b>	Niet van toepassing
<b>Financieel</b>	Aanschaf €883 Wlz: via uitleenpunt Liberein verkrijgbaar op indicatie van ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog Zvw: geen vergoeding
<b>Alternatieven</b>	Gericht op activeren en communiceren CRDL Gericht op slapen: Somnox Gericht op slapen: verzwaarde deken



# Qwiek UP

## Foto



<b>Productgroep</b>	Ontspanning Activeren Sensorische integratie Beeld en geluid
<b>Website</b>	<a href="#">Brengt belevingsgerichte zorg naar uw zorgcentrum   Qwiek</a>
<b>Handleiding</b>	<a href="#">Qwiek.up - Qwiek support</a>
<b>Korte beschrijving</b>	Verrijdbare beamer waarmee gericht beelden en geluiden aangeboden kunnen worden.
<b>Hoe het werkt</b>	De Qwiek.up biedt de mogelijkheid tot het reguleren van prikkels. De Qwiek projecteert zowel op de muur als op het plafond. Er zijn verschillende modules met beelden en geluiden die aangeboden kunnen worden.
<b>Doel inzet</b>	De bewoner kan afgeleid worden tijdens een zorgmoment dat stress geeft. Door de aandacht te veleggen naar de rustige beelden en muziek kunt u rust en ontspanning creëren. De Qwiek kan ook ingezet worden als welzijnsactiviteit, of hulp bieden bij ongeremd gedrag. Het is mogelijk om bewoners te stimuleren om meer te bewegen.
<b>Internet / WiFi</b>	Niet nodig voor inzet
<b>Financieel</b>	Niet particulier aan te schaffen Wlz: er zijn meerdere QwiekUps binnen Liberein aanwezig. Wil je er één proberen geef dit dan door aan ... Zvw: geen vergoeding
<b>Alternatieven</b>	BeleefTV, vraagt meer (inter)actie door gebruikers Tovertafel, vraagt meer (inter)actie door gebruikers

# Qwiek UP belevingsmodule

## Foto



<b>Productgroep</b>	Ontspanning Activeren Sensorische integratie Beeld en geluid
<b>Website</b>	<a href="#">Belevingsmodules – Qwiek-NL</a>
<b>Handleiding</b>	
<b>Korte beschrijving</b>	Elke belevingsmodules bevat een uitgebreide selectie videofragmenten, met bijpassende muziek of geluiden. Hieruit kan de gebruiker op het moment zelf een keuze maken, afhankelijk van de situatie, het doel en de interesses van de betreffende cliënt/patiënt.
<b>Hoe het werkt</b>	Module is te gebruiken in de QwiekUp. Afhankelijk van het thema worden er beelden en geluiden afgespeeld.
<b>Doel inzet</b>	De bewoner kan afgeleid worden tijdens een zorgmoment dat stress geeft. Door de aandacht te veleggen naar de rustige beelden en muziek kunt u rust en ontspanning creëren. De Qwiek kan ook ingezet worden als welzijnsactiviteit, of hulp bieden bij ongeremd gedrag. Het is mogelijk om bewoners te stimuleren om meer te bewegen.
<b>Internet / WiFi</b>	Niet van toepassing
<b>Financieel</b>	Wlz: er zijn meerdere modules via het uitleenpunt Liberein te lenen
<b>Alternatieven</b>	

# Wonderfoon

## Foto



<b>Productgroep</b>	Ontspanning
<b>Website</b>	<a href="http://Wonderfoon-mini-jukebox-Dé-Dementie-winkel.nl">Wonderfoon - mini jukebox - Dé Dementie-winkel.nl</a>
<b>Handleiding</b>	
<b>Korte beschrijving</b>	De Wonderfoon is een oude gerecyclede PTT-telefoon die is omgebouwd tot mini jukebox.
<b>Hoe het werkt</b>	<p>Wanneer iemand de hoorn van de haak neemt klinkt de kiestoon, en wanneer de beller een nummer draait tussen de 0 en de 9, dan speelt de telefoon via de hoorn een liedje af.</p> <p>Met 3-cijferige codes kan een begeleider of familielid een andere map met liedjes kiezen, kunt u het volume aanpassen of de Wonderfoon op continue afspelen instellen.</p> <p>Met de Wonderfoon kunnen liedjes, verhaaltjes of zelf ingesproken berichten worden afgespeeld. Door de Wonderfoon met de USB-kabel aan te sluiten op een PC of laptop kun je je eigen geluidsbestanden op de Wonderfoon zetten. Er kunnen 30 liedjes op worden gezet, drie mappen met 10 liedjes.</p>
<b>Doel inzet</b>	Herinneringen ophalen.
<b>Internet / WiFi</b>	Niet van toepassing
<b>Financieel</b>	Particuliere aanschaf: €99,90 via <a href="http://www.dementie-winkel.nl">www.dementie-winkel.nl</a> Wlz: via uitleenpunt Liberein
<b>Alternatieven</b>	YouTube Spotify

# Robothuisdieren

## Foto



<b>Productgroep</b>	Ontspanning
<b>Website</b>	<a href="http://www.interactieve-robot-kat-speciaal-voor-ouderen-d%C3%A9-dementie-winkel.nl">Interactieve robot kat speciaal voor ouderen - Dé Dementie-winkel.nl</a>
<b>Handleiding</b>	<p>Met een schuifje onder de vacht op haar buik kan de kat worden aan en uit gezet, met de extra mogelijkheid het geluid uit te zetten. Een vrolijke miauw klinkt als je de kat aanzet en zij zal af en toe met vriendelijk gemiauw om aandacht vragen.</p> <p>Aai je de kat over de linkerwang, dan zal zij haar kopje naar je hand bewegen.</p> <p>Aai je de kat achterop haar kop of rug, dan gaat zij vrolijk spinnen. Wanneer je de kat blijft aanhalen, dan rolt zij op de rug, zodat je haar ook op de buik kunt aaien.</p> <p>Op een gegeven moment zal zij ontspannen de ogen sluiten en genieten van de knuffelsessie.</p> <p>Wanneer de kat een paar minuten niet aangehaald wordt, sluit zij haar ogen en gaat 'slapen'. Een kloppje op de rug maakt haar weer wakker.</p> <p>Werkt op 4x LR14C alkaline batterijen. Deze worden meegeleverd.</p> <p>De kat kan niet gewassen worden. U kunt de kat wel regelmatig met een vochtige doek schoonmaken. Af en toe kunt u ook een desinfectiemiddel toepassen dat op textiel gebruikt mag worden. De fabrikant adviseert <a href="#">Sani Cloth Active doekjes</a>. Deze zijn effectief tegen Noro-virus. In '<a href="#">veel gestelde vragen</a>' staat onder andere de vraag "Hoe reinig ik de huisdieren?". Daar vindt u een korte handleiding.</p>
<b>Korte beschrijving</b>	<a href="https://youtu.be/sf2NnwVwXR8?si=KHRq1Gx41MmCuGAU">https://youtu.be/sf2NnwVwXR8?si=KHRq1Gx41MmCuGAU</a>
<b>Hoe het werkt</b>	Door aanhalen en aaien blijft het dier bewegen en geluid maken.
<b>Doel inzet</b>	Activering Rust bieden
<b>Internet / WiFi</b>	Niet van toepassing
<b>Financieel</b>	Particulier aanschaffen Wlz: inzet via activiteiten begeleiding of eigen aanschaf
<b>Alternatieven</b>	Reguliere knuffeldieren

# Radio / muziekspeler met 1 knop

## Foto



<b>Productgroep</b>	Ontspanning Beeld en geluid
<b>Website</b>	<a href="http://hulpmiddelenwijzer.nl">Radio of muziekspeler met één knop (hulpmiddelenwijzer.nl)</a>
<b>Handleiding</b>	YouTube demonstratie <a href="https://youtu.be/15J9X0s9u0A?si=vRMjZtNIVZn3qxqW">https://youtu.be/15J9X0s9u0A?si=vRMjZtNIVZn3qxqW</a>
<b>Korte beschrijving</b>	Stekker in stopcontact, klepje open zetten en er speelt een vooraf ingestelde 'zender' muziek af.
<b>Hoe het werkt</b>	Er zijn verschillende uitvoeringen. Bij sommige apparaten kan alleen via een USB-kabel muziek worden toegevoegd. Bij andere is ook een radiofunctie beschikbaar. De zenderkeuze kan vooraf worden ingesteld. Ook kan muziek afgespeeld worden met een USB stick.
<b>Doel inzet</b>	Met een radio of muziekspeler met één knop kunnen mensen met dementie van hun favoriete muziek genieten wanneer ze willen. U hoeft niet te wachten tot iemand de muziek aan zet, maar u kunt dit door de eenvoudige bediening zelf doen. Muziek heeft een positief effect op het welzijn van mensen. Muziek ontspant en bij dementerende ouderen kan muziek uit hun jeugd weer toegang geven tot herinneringen.
<b>Internet / WiFi</b>	Niet van toepassing
<b>Financieel</b>	Aanschaf van afdelingsbudget
<b>Alternatieven</b>	

# CRDL

## Foto



**Productgroep** Zintuigactivering

**Website** [Home - nl : Crdl](https://www.crdl.nl)

## Handleiding



Crdl-manual\_B111\_2023.01\_A6\_NL\_v1.pdf

## Korte beschrijving

Crdl creert momenten van betekenisvol contact tussen mensen met een fysieke of cognitieve beperking en hun dierbaren. Het instrument brengt een zintuigelijk verdiepende ervaring door de schoonheid van aanraking en geluid te verkennen.



Crdl\_Brochure\_NL\_2021\_02\_Ir.pdf

## Hoe het werkt

### Doel inzet

### Internet / WiFi

Niet van toepassing.  
Het moet wel met regelmaat worden opgeladen.

### Financieel

Wlz: inzet via de activiteitenbegeleiding

### Alternatieven

# Voortbewegen

# Wolk heupairbag

Alleen op afdeling Kolibrie

## Foto



**Productgroep** Voortbewegen

**Website** [Zorgprofessional – Wolk \(wolkairbag.com\)](http://Zorgprofessional-Wolk(wolkairbag.com))  
[Wolk heupairbag: dé bescherming tegen heupfracturen \(wolkairbag.com\)](http://Wolk heupairbag: dé bescherming tegen heupfracturen(wolkairbag.com))

## Handleiding

### Korte beschrijving



Wolk-Heupairbag-  
Wat-is-Wolk-480.mc

## Hoe het werkt

## Doel inzet

## Internet / WiFi

**Financieel** Wlz: via uitleenpunt in te zetten op indicatie van een fysiotherapeut  
Zvw: door client aan te schaffen

**Alternatieven** Safehip



# Safehip

## Foto



**Productgroep** Voortbewegen

**Website**

**Handleiding**

**Korte beschrijving**

**Hoe het werkt**

**Doel inzet**

**Internet / WiFi**

**Financieel** Wlz: via uitleenpunt in te zetten op indicatie van een fysiotherapeut  
Zvw: door client aan te schaffen

**Alternatieven**

# Meten en weten

# Withings sleepanalyzer

## Foto




<b>Productgroep</b>	Slapen
<b>Website</b>	<a href="#">Under-mattress sleep tracker - Sleep Analyzer   Withings</a>
<b>Handleiding</b>	YouTube: <a href="#">Under-mattress sleep tracker - Sleep Analyzer   Withings</a>
<b>Korte beschrijving</b>	Je draagt niets aan je lijf, het product ligt onder het matras Inzicht in slaappatroon waardoor gerichte interventie gestart kan worden Ontdekken van slaapapneu
<b>Hoe het werkt</b>	Wordt uitgeleend met een iPhone waarop de app staat. Sleepanalyzer en iPhone worden gekoppeld. Profiel van de gebruiker wordt anoniem ingevuld (sleepanalyzer X, geboortejaar 19XX, geslacht). Via de app worden de slaapgegevens over een afgesproken perioden uitgelezen en geanalyseerd door een psycholoog.
<b>Doel inzet</b>	Inzicht krijgen in slaapkwaliteit en -duur.
<b>Internet / WiFi</b>	Niet nodig. Wel een koppeling via bluetooth met de iPhone.
<b>Financieel</b>	Particulier: €150 (via Withings.com) Wlz: via uitleenpunt Liberein verkrijgbaar op indicatie van ergotherapeut of psycholoog
<b>Alternatieven</b>	Om een compleet beeld te krijgen van de slaapkwaliteit van een bewoner en slaap beïnvloedende factoren is het interessant om ook na te denken over onderstaande: Tijdstip van naar bed gaan (de meeste ouderen hebben aan 6 a 8 uur slaap genoeg. Wanneer wordt iemand wakker als hij rond 20.00 uur naar bed gaat?) Lang wakker liggen voordat iemand inslaapt Vroeg opstaan Hoeveel beweegt iemand overdag? Komt iemand buiten, krijgt hij voldoende (dag)licht? Drinkt iemand voor het naar bed gaan koffie of alcohol? Gebruikt iemand medicatie die de slaap beïnvloedt?  Gunstig effect op slaap: Verzwaringsdeken Ligorthese

# Countair dosisteller

## Foto



<b>Productgroep</b>	Medicatieveiligheid
<b>Website</b>	<a href="#">CountAir - Hulpmiddel voor longpatiënten: teller voor je inhalator.</a>
<b>Handleiding</b>	Gebruik: <a href="#">131_1.patiëntenkaart-countair-lr-1.pdf (inhalatorgebruik.nl)</a> Inhalator geschikt? <a href="#">Overzicht geschikte inhalatoren - CountAir</a>  countair-032023.mp3 4 Inhalatieinstructie
<b>Korte beschrijving</b>	De CountAir is de teller voor je inhalator.
<b>Hoe het werkt</b>	De CountAir is een houder waarin de inhalator wordt geplaatst. Hij houdt het aantal doseringen in de puffer bij door af te tellen. Zo kun je altijd zien hoeveel doseringen er nog in de inhalator aanwezig zijn
<b>Doel inzet</b>	Veel patiënten gebruiken hun dosis-aerosol nog terwijl er geen werkzame medicatie meer aanwezig is, waardoor zij dus geen, of een tekort aan, werkzame stof inhaleren. Door de inzet van dit hulpmiddel zal dit niet meer voorkomen.
<b>Internet / WiFi</b>	Niet van toepassing
<b>Financieel</b>	Aanschaf €18,95 particulier Zvw: via huisarts Wlz: via uitleenpunt te gebruiken
<b>Alternatieven</b>	Geen

# Tena identify / Slim incontinentie- materiaal

<nog niet ingebruik>

## Foto



<b>Productgroep</b>	Persoonlijke verzorging Naar toilet gaan
<b>Website</b>	<a href="#">TENA SmartCare Identifi - TENA</a>
<b>Handleiding</b>	
<b>Korte beschrijving</b>	De oplossing registreert mictiepatronen, volumes en toiletbezoeken gedurende een periode van 72 uur. Deze gegevens worden doorgestuurd naar een beveiligde webportal waar ze in een gemakkelijk te begrijpen overzicht worden gepresenteerd.
<b>Hoe het werkt</b>	De bewoner draagt 72 uur incontinentiemateriaal met sensoren. Deze registreren wanneer en hoeveel er wordt geplast. Identifi bestaat uit drie delen: wegwerpbaar Sensor Wear verbanden, een herbruikbaar Logger Kit en toegang tot de webportal. Het pakket wordt ook geleverd met volledige instructies, ondersteuning en training.
<b>Doel inzet</b>	Verbeterde verschoningsroutines, het gebruik van de juiste producten en een efficiënter en duurzamer gebruik van personeel en middelen mogelijk maakt.
<b>Internet / WiFi</b>	Wifi voor het verzenden van gegevens tussen logger en portaal
<b>Financieel</b>	Wlz
<b>Alternatieven</b>	Geen

# FreeStyleLibre

## Foto



<b>Productgroep</b>	Monitoren Meten
<b>Website</b>	<a href="#">FreeStyle Libre 3-systeem</a>
<b>Handleiding</b>	
<b>Korte beschrijving</b>	Nauwkeurige 14-daagse continue glucose monitoring systeem om de duur van hypoglycemie te verminderen en de algehele glucoseregulatie te verbeteren.
<b>Hoe het werkt</b>	Sensor op de arm, die blijft 14 dagen zitten. Uitlezen via een app op een smartphone.
<b>Doel inzet</b>	Verminderen vingerprikken en toedienen juiste hoeveelheid insuline
<b>Internet / WiFi</b>	Voor de werking van de app is wifi en bluetooth nodig.
<b>Financieel</b>	Zvw Wlz: inzet op indicatie van medische vakgroep VPT
<b>Alternatieven</b>	Glucosemeting middels vingerprik voor bepaling dagcurves

# Activeren

# Smartwall – sport en spelruimte Bruggerbosch

Foto



**Productgroep**

Activeren

**Website**

[SmartWall - Embedded Fitness](#)

**Handleiding**

**Korte beschrijving**

**Hoe het werkt**

**Doel inzet**

**Internet / WiFi**

**Financieel**

Niet van toepassing

**Alternatieven**



# Tovertafel

## Foto



## Productgroep

Activeren

## Website

[Tovertafel: dé innovatie in de zorg | Tover](#)

## Handleiding

### Korte beschrijving

De tovertafel is een innovatieve zorgtechnologie die medewerkers in staat stelt om op een gebruiksvriendelijke manier de beste zorg aan hun cliënten te bieden. Dankzij het ingenieuze klik en klaar systeem is de Tovertafel makkelijk te installeren en blijft de vertrouwde leefomgeving intact.

### Hoe het werkt

De tovertafel hangt aan het plafond en projecteert spellen op een tafel er onder. Door handbewegingen over de projecties worden de spellen gespeeld.

### Doel inzet

Activering (mentaal)

## Internet / WiFi

## Financieel

## Alternatieven

# Belevenistafel

Foto

Productgroep      Activeren

Website

Handleiding

Korte beschrijving

Hoe het werkt

Doel inzet

Internet / WiFi

Financieel

Alternatieven

# BeleefTV

## Foto



<b>Productgroep</b>	Activeren
<b>Website</b>	<a href="http://www.debeleefTV.com">www.debeleefTV.com</a>
<b>Handleiding</b>	
<b>Korte beschrijving</b>	Spellen spelen, alleen en samen Muziek luisteren in combinatie met het zien van beelden Praten over vroeger aan de hand van thema's en beelden
<b>Hoe het werkt</b>	BeleefTV is vergelijkbaar met een grote tablet. Er zijn verschillende applicaties die open gezet kunnen worden. In groepsverband en onder begeleiding (van een vrijwilliger of medewerker) kunnen de bewoners de verschillende activiteiten mee doen.
<b>Doel inzet</b>	Activering Zinvolle dag
<b>Internet / WiFi</b>	Internet verbinding via wifi is vereist
<b>Financieel</b>	Wlz: verschillende locaties hebben een BeleefTV. Bekend bij het uitleenpunt waar deze zijn.
<b>Alternatieven</b>	Tovertafel (vast aan plafond) Smartwall (grote muur nodig voor projectie)

# Fietslabrynth

Foto

Productgroep      Activeren

Website

Handleiding

Korte beschrijving

Hoe het werkt

Doel inzet

Internet / WiFi

Financieel

Alternatieven

# Silverfit

Foto

Productgroep      Activeren

Website

Handleiding

Korte beschrijving

Hoe het werkt

Doel inzet

Internet / WiFi

Financieel

Alternatieven

